

IMPサージカルガイドチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止事項】

(使用方法)

再使用禁止。[感染の恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

品番	品名
00027	シンプラント互換 N
00028	シンプラント互換 R
00029	シンプラント互換 W
00030	ストローマン互換 R
00031	ノーベルガイド互換 N
00032	ノーベルガイド互換 R
00033	ノーベルガイド互換 W

成分:チタン合金

〈原理〉

インプラント計画に基づく位置及び方向にドリルを導くためのガイドである。本品を歯科用コンピューター支援・設計ユニットで製作したサージカルガイドのドリル孔に装着し、歯科用インプラント手術の際に使用するサージカルガイドを製作する。

【形状・構造】

シンプラント互換



ストローマン互換



ノーベルガイド互換



【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント手術時にドリル孔の位置及び方向を決定して、ドリルを正確な進路に導くために用いる。

【使用方法等】

- 使用前後に必ず洗浄・滅菌を行うこと（【保守・点検に係る事項】参照）
- 使用方法
 - サージカルガイド作成時、サージカルガイド本体に本品をイ

ンプラント埋入位置に合わせて挿入し固定させる。

- インプラント埋入手術でドリリングを行う際、ドリルの位置、方向を正確に誘導する。
- 滅菌方法及び滅菌条件

	高圧蒸気滅菌 (重力置換)	高圧蒸気滅菌 (プレバキューム)
滅菌温度	132～135℃	132～135℃
滅菌時間	15分	4分
乾燥時間	30分	30分

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- 使用前に必ず滅菌を行うこと。
- 本品の取り扱いには十分に注意すること。[本品は術野内等で破損し体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。]

【使用上の注意】

- 不具合・有害事象
本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
 - 不具合
 - 変形、破損、摩耗
 - 有害事象
 - 本品の分解及び破損により起こる作業者の損傷
 - 本品の不十分な洗浄、滅菌に起因する感染。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温、、多湿、直射日光を避け室温で保管

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 合同会社IMPデンタルマテリアルセールス
住所 〒622-0321
京都府船井郡丹波町橋爪瀬上 112 番地 122
電話番号 050-6875-6535