

機械材料 9 歯科用研削材料


一般医療機器 技工用アプレシブ研削器具 JMDNコード：70901000

酸化アルミナファイバーポイント

【形状・構造及び原理等】

1) 形状

丸棒型。

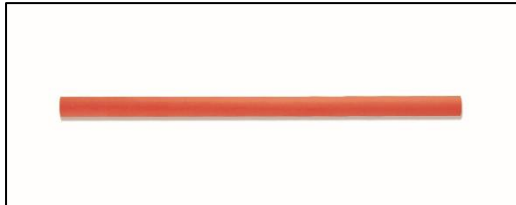

種類	色
コース	紫
ミディアム	青
ファイン	赤

2) 構造

酸化アルミナ長繊維を樹脂で結合、一体化させた丸棒型である。

・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 合同会社IMPデンタルマテリアルセールス
住所 〒622-0321
京都府船井郡丹波町橋爪瀬上 112 番地 122
電話番号 050-6875-6535

【使用目的、効能効能又は効果】

本品は、アルミナ等を用いた技工用研削材である。

【操作方法又は使用方法】

- 本品を歯科用駆動装置及びハンドピース等に装着して、通法により使用すること。

〈使用上の注意〉

- 推奨する回転速度内で使用する。
最高許容回転速度(毎分 20,000 回転)を超える速度で使用しない。
- ハンドピースメーカーの指定に従って軸を確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 本品を取り付ける歯科用ハンドピースの取扱いは添付文書及び取扱説明書に記載されている内容を遵守し使用すること。
- 変形、損傷(錆、表面キズ、曲がり、汚損)等のあるものは使用しないこと。
- 使用前に回転させてブレがないことを確認すること。ブレのあるものは使用しないこと。
- 過度の加圧、無理な角度で使用すると、折れたり曲がったりすることがあるので、当該条件を避けること。
- 本品又は切削屑が目に入らないように保護メガネ等を装着すること。
万が一目に入った時は、すぐに多量の流水で洗い流し、眼科医の検診を受けること。
- 被研削物の過度な発熱や本品の破損を防止するため、被研削物に過度の力を加えないこと。
- 本品を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 本品の使用により、感作またはアレルギー反応が現れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】