

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器 JMDN コード: 10201000

ツイスター咬合器

【禁忌・禁止】

- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしないこと

【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
下記の通り



- 原材料
ポリプロピレン ステンレス
- 包装
1台/包

【使用目的、効能効能又は効果】

本品は、下顎運動をシミュレートするために用いる。

【操作方法又は使用方法】

- 歯科専用 CAD ソフト内ライブラリーからアダプターのデータをダウンロードし、上下顎模型と結合させた3D モデルを出力する
- それぞれ上下の3D 模型のアダプターポールを本品の上下ソケットに嵌め込み、それぞれ横のねじを回して締めて固定する。
- 通法により歯科技工作業を行う。
- 上下咬み合わせた状態での模型の最大高さは 65mm以下とする

〈使用上の注意〉

- 器具に対して、形状変更・または打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは、破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 本品は金属製の部品が含まれているため、洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥させること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 金属製の部品の「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、さびている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は、破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 合同会社IMPデンタルマテリアルセールス
住所 〒622-0321
京都府船井郡丹波町橋爪洲上 112 番地 122
電話番号 050-6875-6535